

Bevor Sie in den Urlaub fahren ...

Wenn eine zahnärztliche Behandlungseinheit mehrere Wochen lang nicht benutzt wird, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten und die Lebensdauer der Behandlungseinheit zu verlängern. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Anleitung zur Pflege und Vorbereitung einer Behandlungseinheit für den Urlaub (kann je nach Marke/Hersteller variieren):

1

Flächen und Arbeitsbereiche

Wischen Sie alle sichtbaren Oberflächen mit geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ab.

Achten Sie besonders auf Bedienelemente, Griffe, Lichtquellen und Patientenstuhlbezüge.

2

Absaug- und Speichelsammelsysteme

Reinigen und desinfizieren Sie das Saugsystem gründlich mit dem empfohlenen Saugreiniger (in der Regel enzymatische Reinigung mit anschließender Desinfektion).

Spülen Sie mit reichlich sauberem Wasser nach, wenn dies vom Hersteller empfohlen wird.

3

Instrumentenschläuche und Handstücke

Entfernen und reinigen Sie alle Handstücke und Turbinen. Schmieren und sterilisieren Sie gemäß den Anweisungen.

Blasen Sie Luft durch die Schläuche und wischen Sie die Anschlüsse gegebenenfalls mit Desinfektionstüchern ab.

4

Wassersystem und Biofilm-Prävention

Wenn Ihre Behandlungseinheit an ein unabhängiges Wassersystem (Flaschensystem) angeschlossen ist:

Entleeren und reinigen Sie die Flasche. Spülen Sie die Schläuche mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel für Dental-Behandlungseinheiten.

Wenn die Behandlungseinheit an die Praxiswasserversorgung angeschlossen ist:

Führen Sie die empfohlene Desinfektionsroutine durch (je nach Systemtyp entweder kontinuierliche oder Stoßdesinfektion).

Schalten Sie dann die Wasserzufuhr zur Behandlungseinheit ab.

HINWEIS: In stehendem Wasser kann sich ein Biofilm bilden – eine angemessene Desinfektion verringert das Risiko.

5

Bei der Rückkehr aus dem Urlaub

Führen Sie eine gründliche Spülung des Wassersystems durch.

Führen Sie die empfohlene Desinfektionsroutine durch (je nach Systemtyp entweder kontinuierliche oder Stoßdesinfektion), oder reinigen Sie bei Flaschenwassersystemen die Wasserflasche und spülen Sie sie mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel.

Führen Sie die tägliche Startroutine durch, einschließlich der Prüfung der Handstücke und des Absaugsystems.

Auf undichte Stellen oder Unregelmäßigkeiten prüfen.

6

Technische Bedingungen

Schalten Sie die Stromversorgung der Behandlungseinheit über den Hauptschalter aus.

Schalten Sie den Kompressor und das Vakuumsystem nach Möglichkeit aus.

Trennen Sie, wenn möglich, Druckluft und Wasser von der Versorgung.

HEKA

7

Zusätzliche Hinweise

Befolgen Sie stets die spezifischen Wartungsanweisungen des Herstellers – z. B. von Heka Dental, wenn Sie an HEKA-Behandlungseinheiten arbeiten.

Wenn Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, kann es eine gute Idee sein, die Behandlungseinheit während Ihres Urlaubs warten zu lassen.

Hier können Sie unseren Hygieneleitfaden für Ihre HEKA-Behandlungseinheit herunterladen:

[Heka S+ Hygieneleitfaden](#)

[Unicline S – Hygieneleitfaden](#)

