

Klargøring af dentalunit før ferieperioder

Når en dentalunit skal stå ubrugt i en ferieperiode på flere uger, er det vigtigt at tage en række forholdsregler for at sikre optimal hygiejne og forlænge udstyrets levetid.

Vi kan anbefale at følge disse råd til hvordan man kan pleje og klargøre en dentalunit til ferie (kan variere, afhængig af mærke/producent):

1

Overflader og arbejdsområder

Aftør alle synlige overflader med egnede rengørings- og desinfektionsmidler.

Husk især kontrolpaneler, håndtag, lyskilder og patientstolens betræk.

2

Suge- og spytopsugnings-systemer

Rengør og desinficér sugesystemet grundigt med anbefalet sugerens (typisk enzymatisk rengøring efterfulgt af desinfektion).

Skyl efter med rigelige mængder rent vand, hvis producenten anbefaler det.

3

Instrumentslanger og håndstykker

Fjern og rengør alle håndstykker og turbiner. Smør og steriliser efter anvisning.

Blæs slangerne igennem med luft og tør evt. med desinficerende servietter ved koblingsstykker.

4

Vandsystem/biofilmforebyggelse

Hvis din dentalunit er koblet til et selvstændigt flaskesystem:

Tøm og rengør flasken.

Skyl slangerne igennem med godkendt desinfektionsmiddel til dentalunits.

Hvis unitten er koblet til klinikkens vandforsyning:

Gennemfør den anbefalede desinfektionsrutine (enten kontinuerlig eller shock-desinfektion afhængigt af systemtype).

Luk herefter for vandtilførslen.

OBS: Biofilm kan opstå i stillestående vand – korrekt desinfektion reducerer risikoen.

5

Ved tilbagevenden efter ferie

Gennemfør en grundig gennemskylning af vandsystemet.

Gennemfør den anbefalede desinfektionsrutine (enten kontinuerlig eller shock-desinfektion afhængigt af systemtype), eller ved vandflaskesystem, rengør vandflasken og skyl igennem med godkendt desinfektionsmiddel.

Udfør den daglige opstartsrutine, inklusive test af håndstykker og sugesystem.

Kontrollér for lækager eller uregelmæssigheder.

6

Tekniske forhold

Sluk strømmen til unitten via hovedafbryder.

Luk for kompressor og eventuelt vakuumsystem, hvis muligt.

Afbryd evt. trykluft og vand, hvis muligt, fra tilførslen.

7

Supplerende råd

Følg altid producentens specifikke vedligeholdelsesvejledning - fx fra Heka Dental, hvis I arbejder på HEKA unitter.

Hvis der er tilknyttet en serviceaftale, kan det være en god idé at få unitten serviceret i forbindelse med ferien.

Du kan downloade vore hygiejnevejledninger på:

[Heka S+ hygiejnevejledning](#)

[Unicline S - Hygiejnevejledning](#)



HEKA